




FILTER TECHNOLOGY

PRESENTA

CONSIGLI SU COME
SANIFICARE IN CASA
LA MASCHERA FFP3
DOPO L'UTILIZZO



SE NON HAI A
DISPOSIZIONE
MASCHERE NUOVE,
PUOI RIUTILIZZARE
QUELLA CHE INDOSSI
SANIFICANDOLA OGNI
GIORNO IN MODO DA
RIMUOVERE
CORRETTAMENTE
EVENTUALI VIRUS
O BATTERI

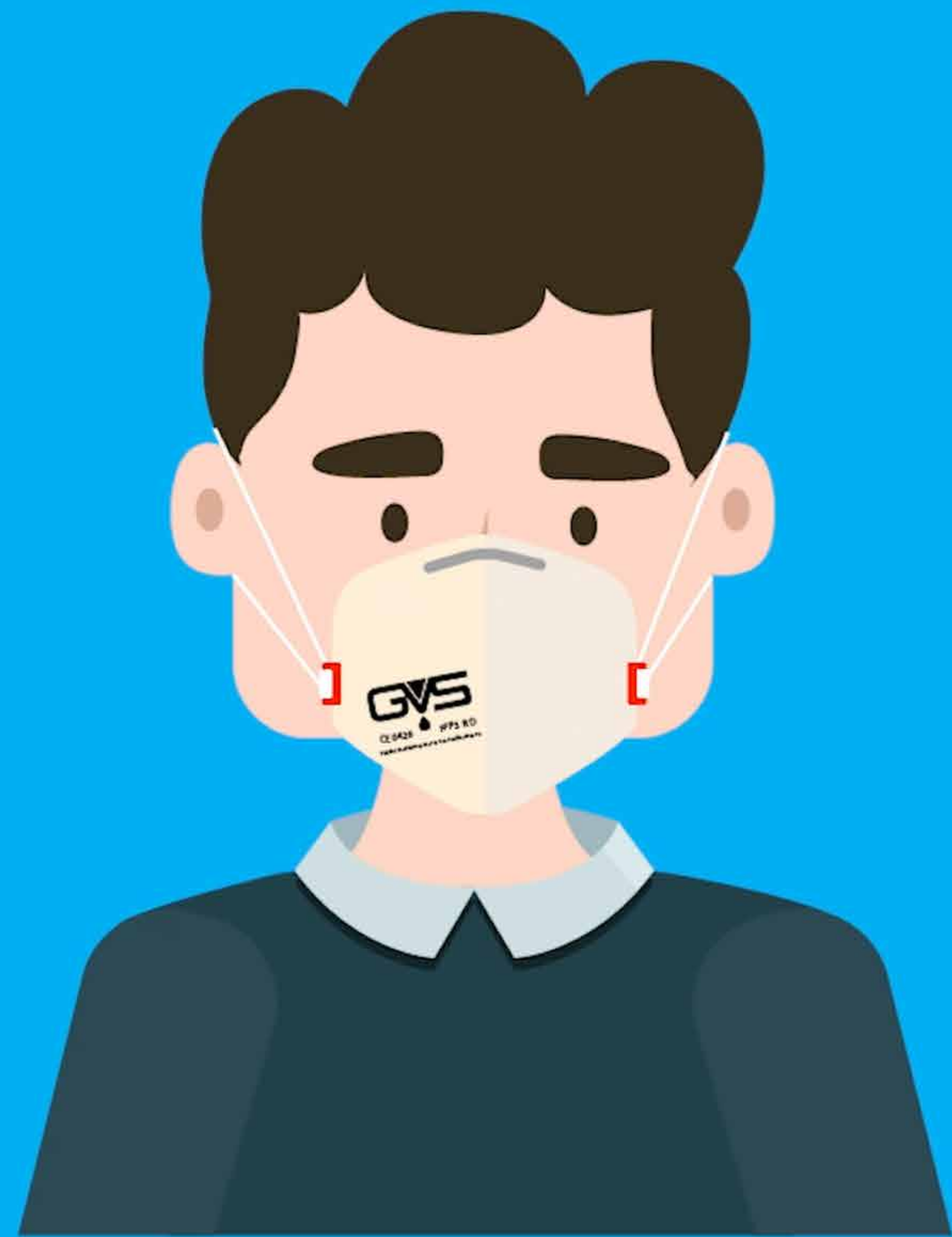



QUESTO PROTOCOLLO
È STATO TESTATO
SOLO SULLE
MASCHERE FFP3
PRODOTTE DA GVS
E NON E' GARANTITO
IL FUNZIONAMENTO
SU ALTRE
MASCHERE



TI RICORDIAMO CHE È SEMPRE CONSIGLIABILE INDOSSARE MASCHERE NUOVE E IMPLEMENTARE QUESTA PROCEDURA SOLO NEL CASO TU NON NE SIA PROVVISORIO

RIMUOVI LA
MASCHERA
NELL'INGRESSO
DI CASA



RIPONILA IN UN
APPOSITO
SACCHETTO
E LASCIALO
ALL'INGRESSO





DISINFETTATI
LE MANI PRIMA
DI SUPERARE
L'INGRESSO
DI CASA

ORA PREPARA GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA SANIFICAZIONE

TI SERVIRANNO:



– UNA PENTOLA CON COPERCHIO

– DELL'ACQUA MOLTO CALDA


(LA TEMPERATURA PIÙ ALTA CHE IL TUO RUBINETTO PUÒ FORNIRE)

– UN FORNO DA CUCINA

– UN TERMOMETRO DA FORNO (SE DISPONIBILE)

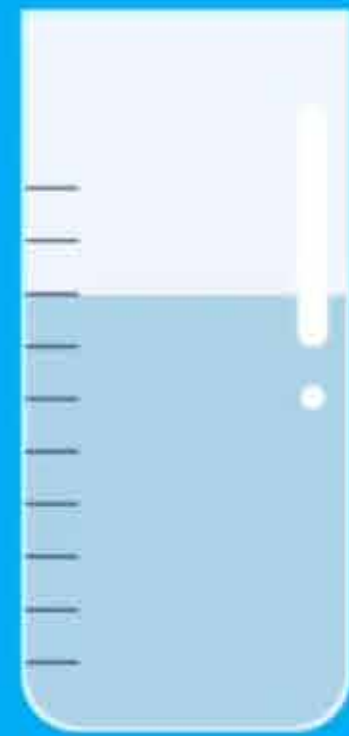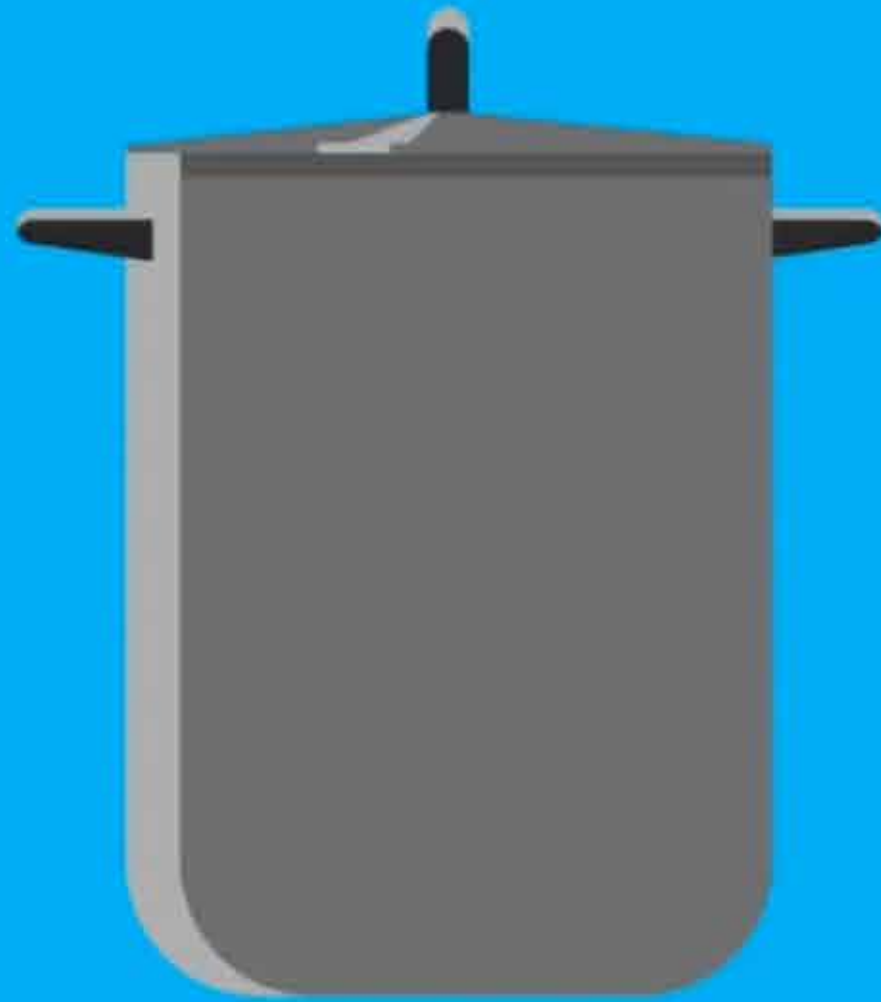

RIEMPI LA PENTOLA CON CIRCA 3 CM DI ACQUA MOLTO CALDA

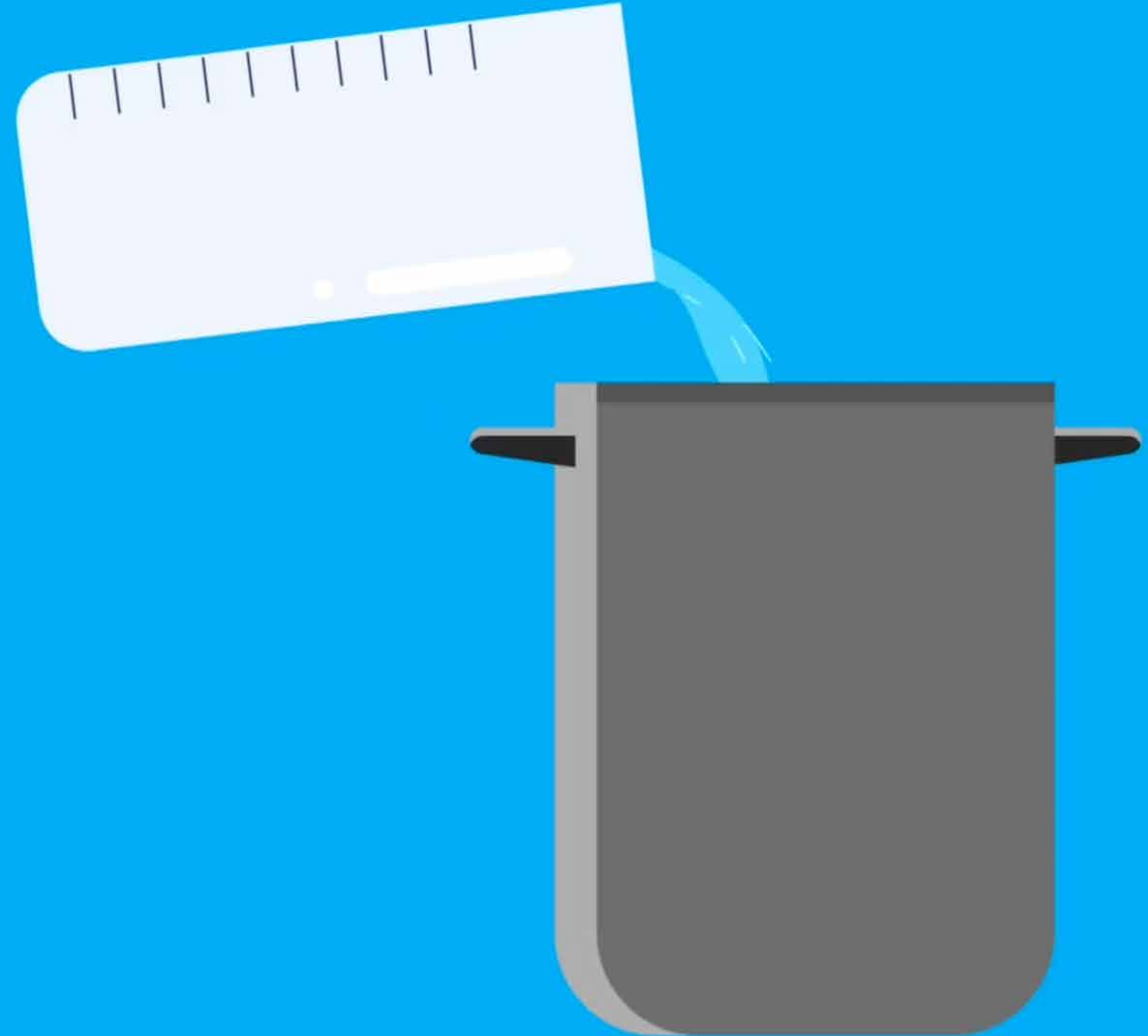


ORA CHE HAI PREPARATO
TUTTO IL NECESSARIO,
ESTRAI LA MASCHERA
DAL SACCHETTO




ALLA FINE DI QUESTO PROCESSO, DOVRAI UTILIZZARE UN NUOVO SACCHETTO PER EVITARE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE



UTILIZZA GLI ELASTICI DELLA MASCHERA PER FISSARLA AL COPERCHIO DELLA PENTOLA

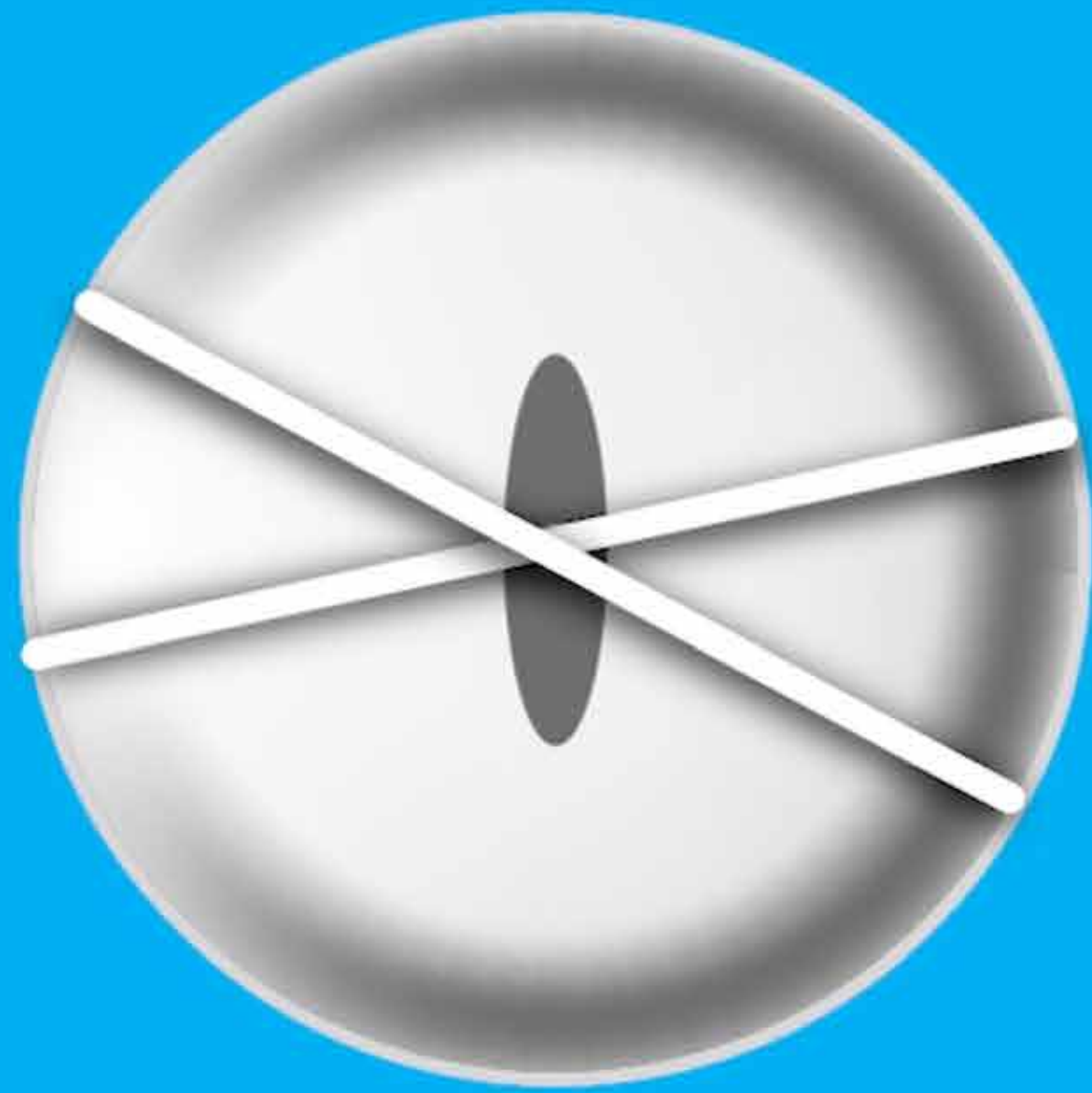



ASSICURATI CHE IL COPERCHIO SIA DI UNA DIMENSIONE CHE PERMETTA DI FISSARE LA MASCHERA ATTORNO AD ESSO, SENZA FORZARE TROPPO GLI ELASTICI RISCHIANDO DI ROMPERLI

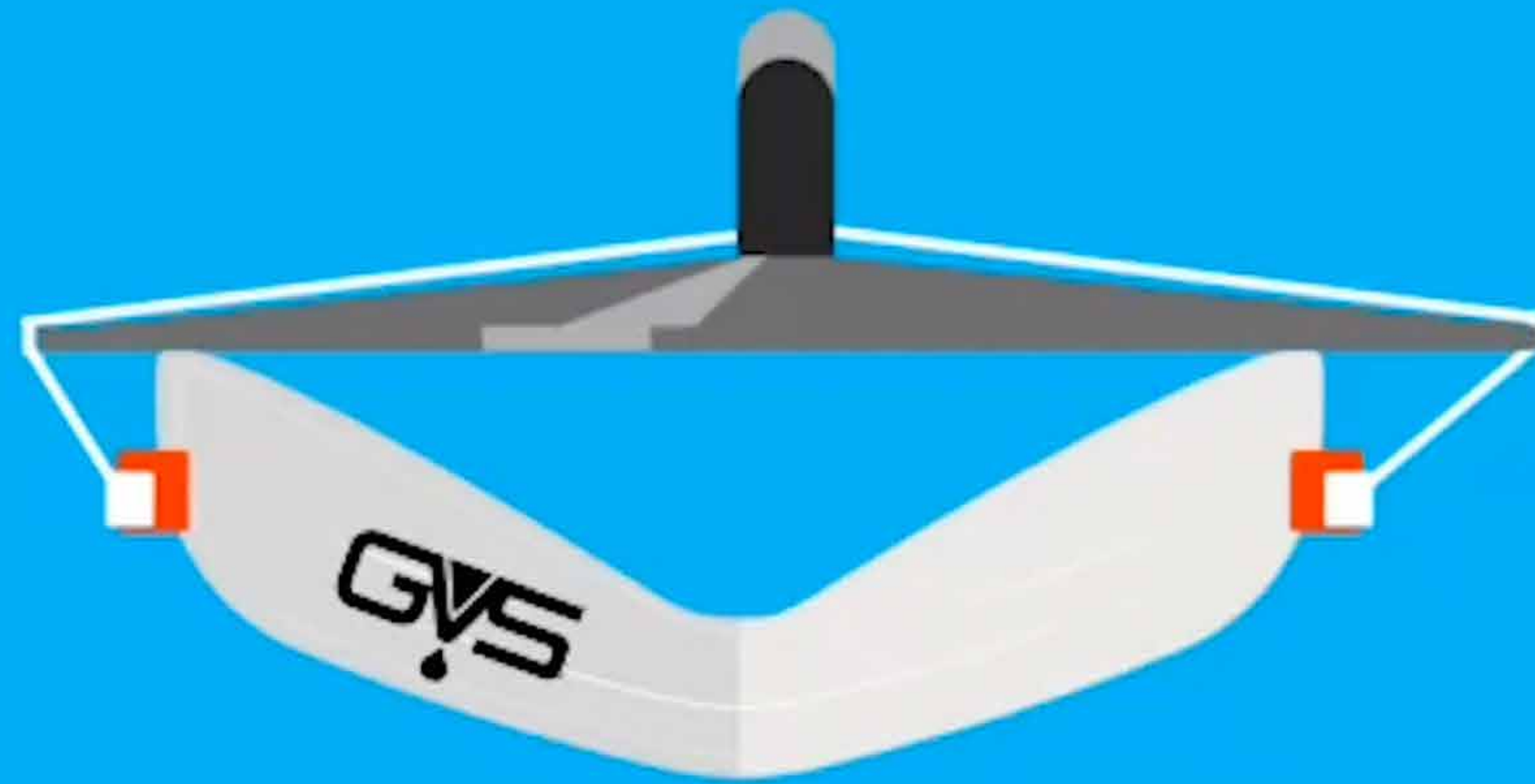





DISINFETTATI
NUOVAMENTE
LE MANI

CHIUDI LA PENTOLA
CON IL COPERCHIO
IN MODO CHE
LA MASCHERA
RIMANGA AL SUO
INTERNO

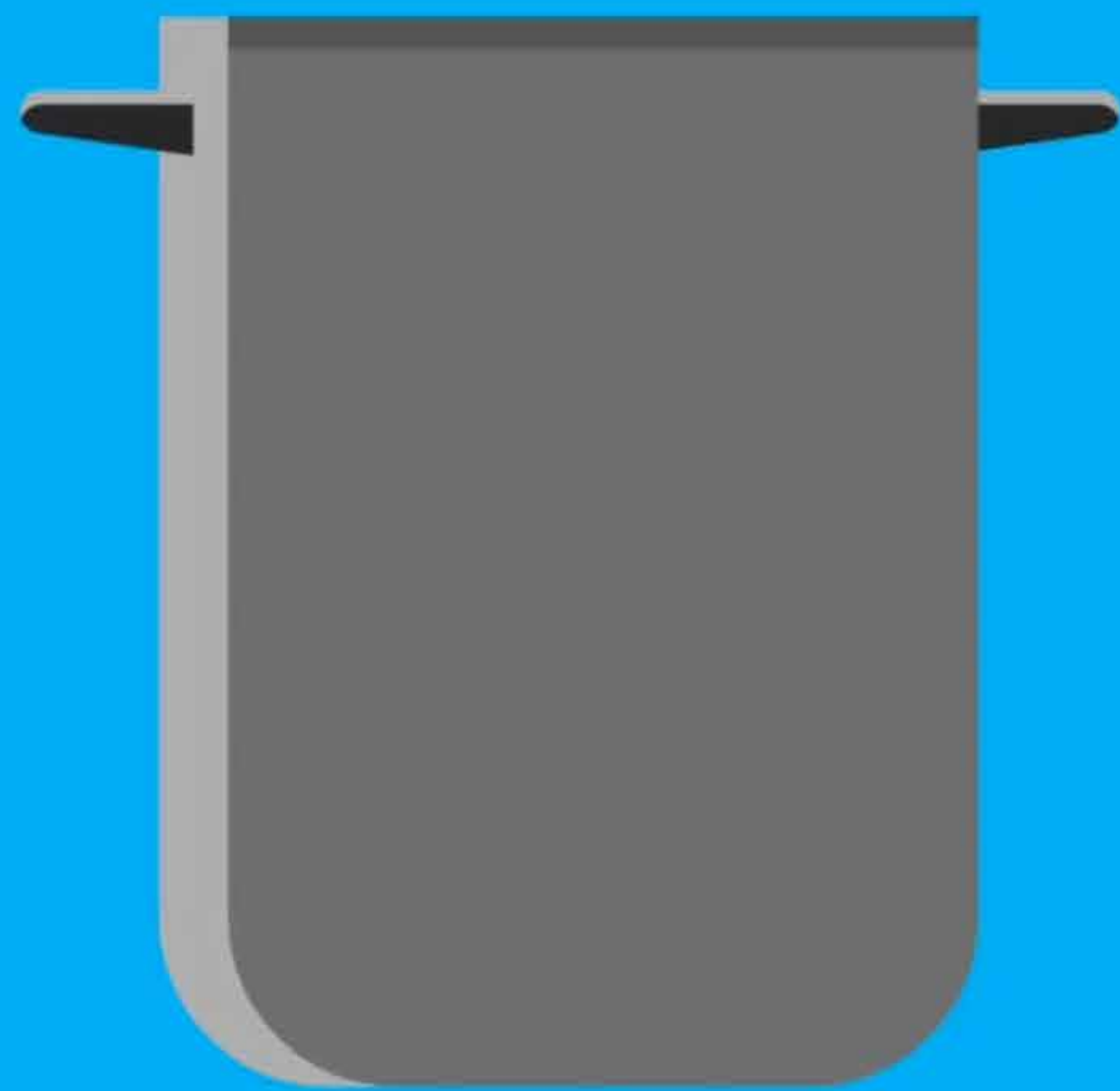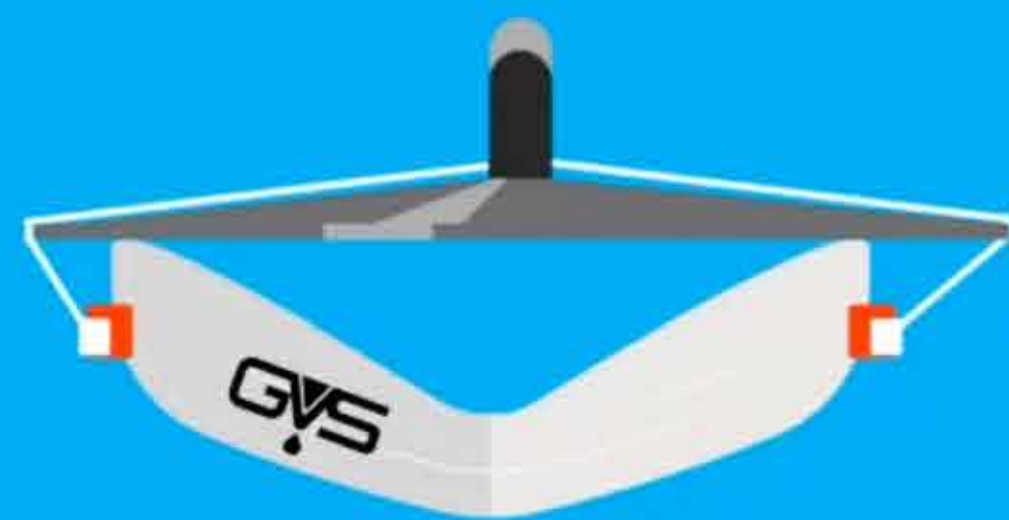


LA PARTE ESTERNA DELLA
MASCHERA, RICONOSCIBILE
PER LA PRESENZA DEL TIMBRO,
DEVE ESSERE RIVOLTA
VERSO L'ACQUA

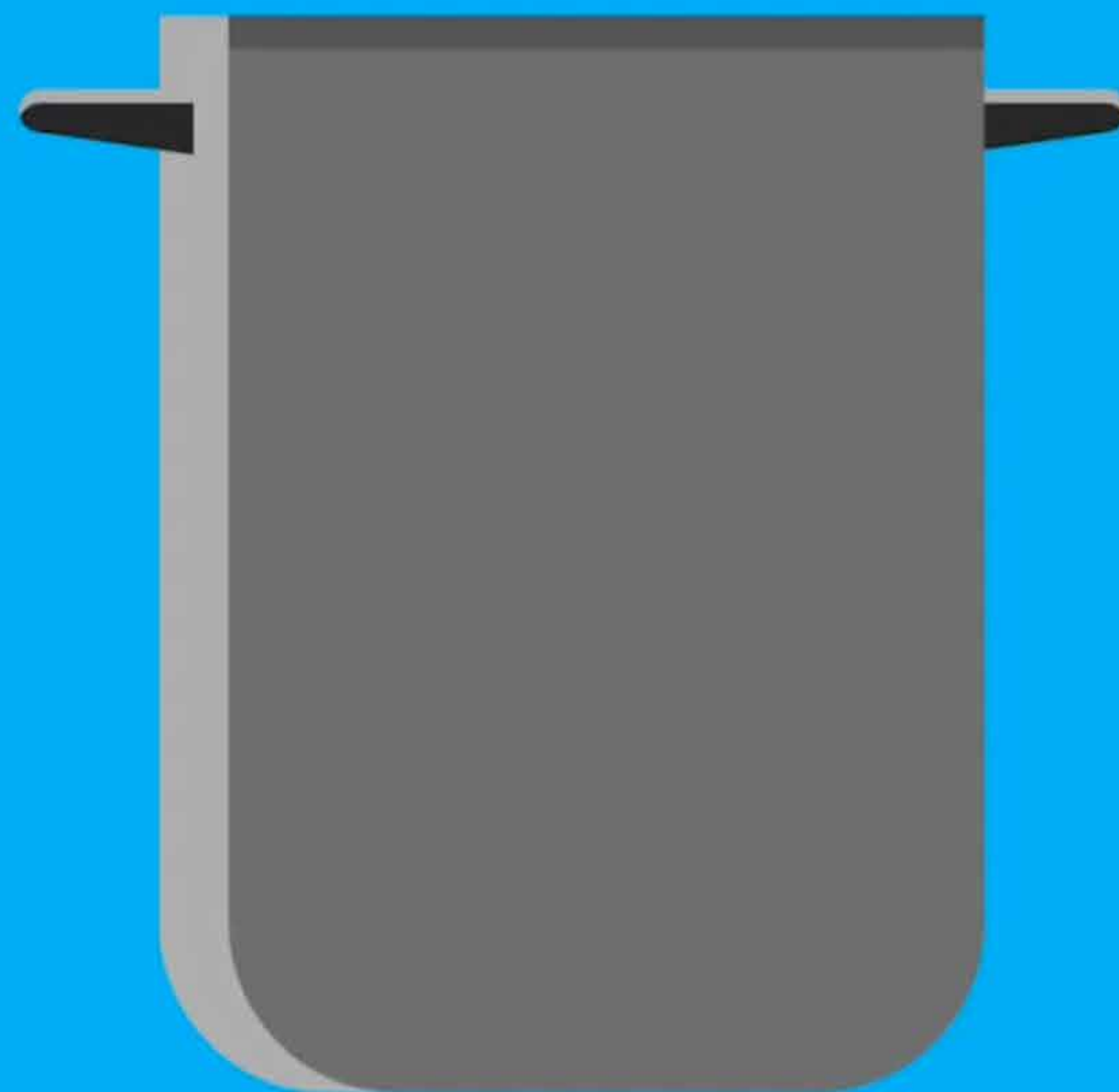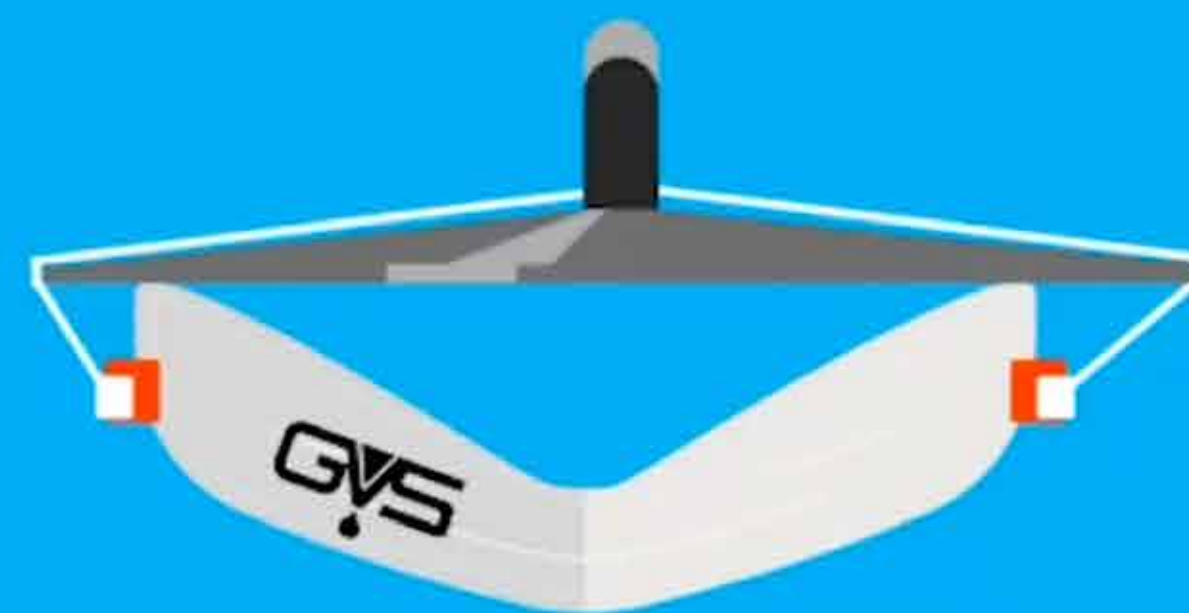


NEL FRATTEMPO PORTA IL FORNO A 65°C



SE POSSIEDI UN TERMOMETRO
DA FORNO PUOI VERIFICARE
CHE ABBA RAGGIUNTO LA
TEMPERATURA ESATTA

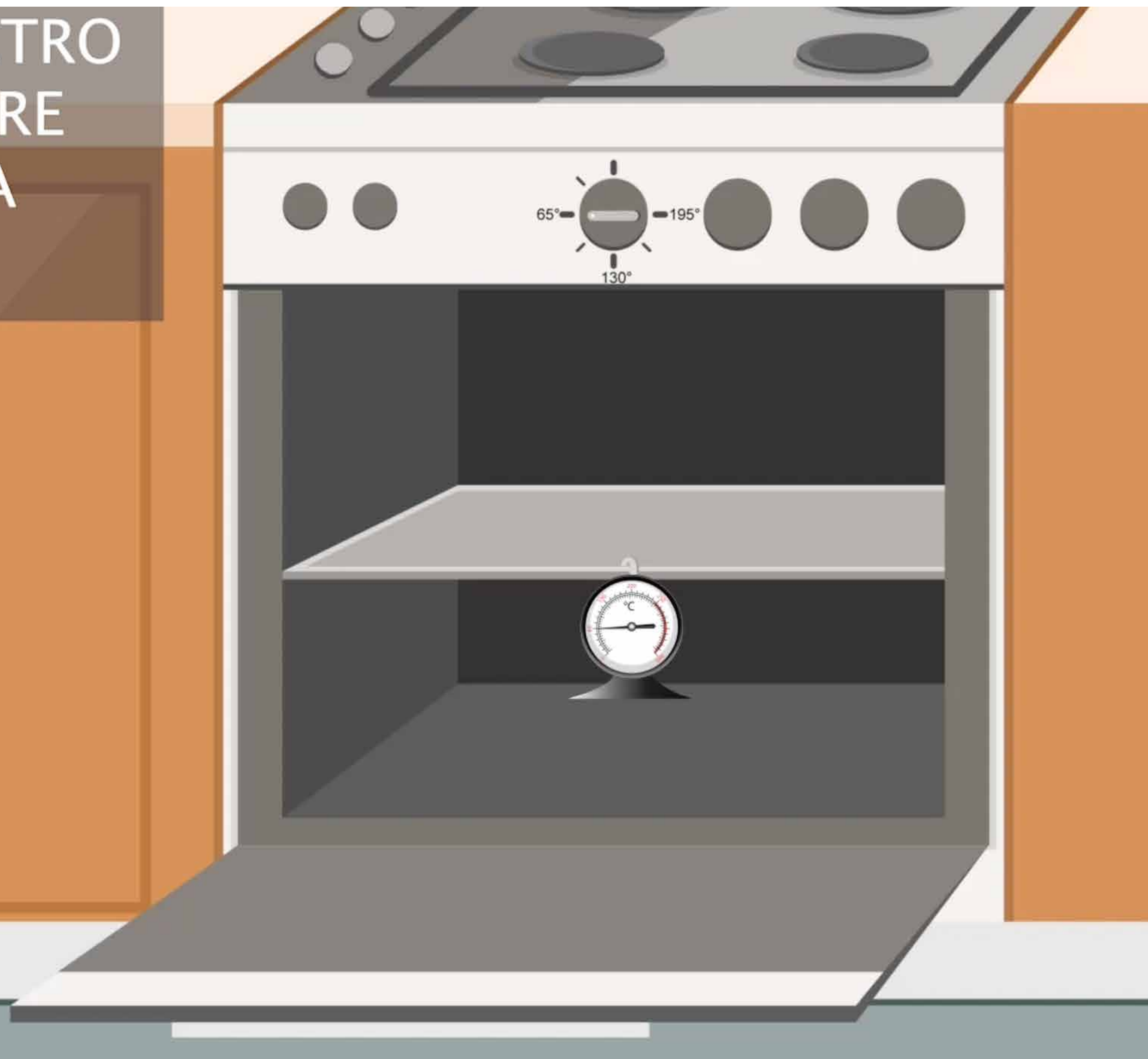

IN OGNI CASO,
NON SUPERARE
LA TEMPERATURA
DI 65°C
PER EVITARE
DI DANNEGGIARE
LA MASCHERA

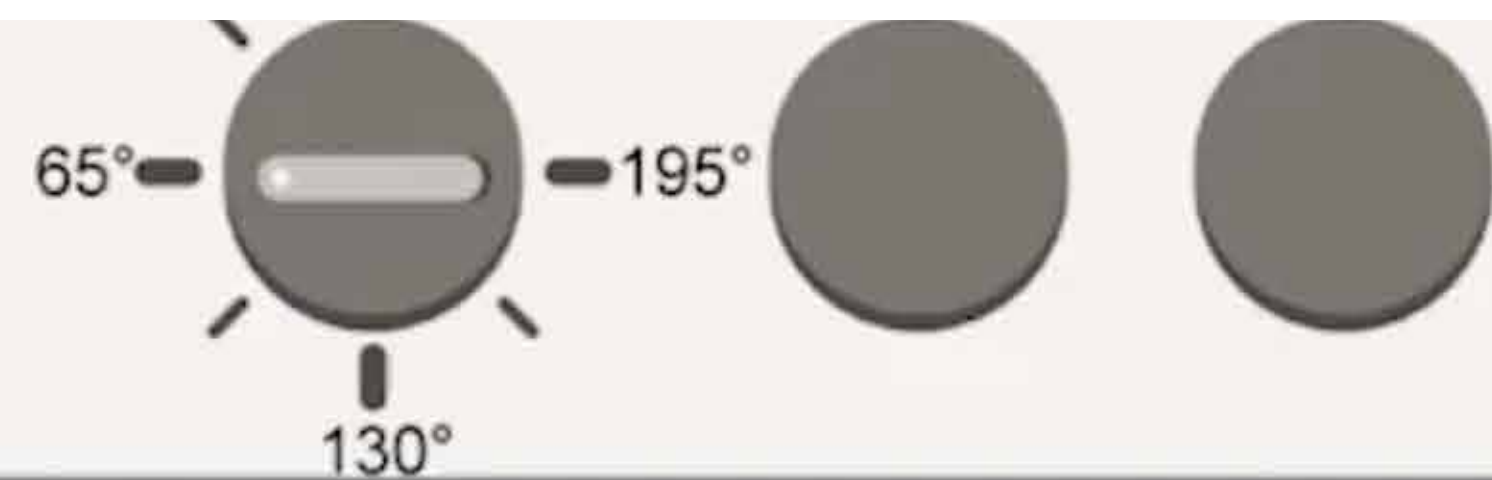


RIPONI NEL FORNO PER UN'ORA LA PENTOLA CON IL
COPERCHIO E ALL'INTERNO LA MASCHERA



TRASCORSA UN'ORA,
RIMUOVI LA PENTOLA
DAL FORNO



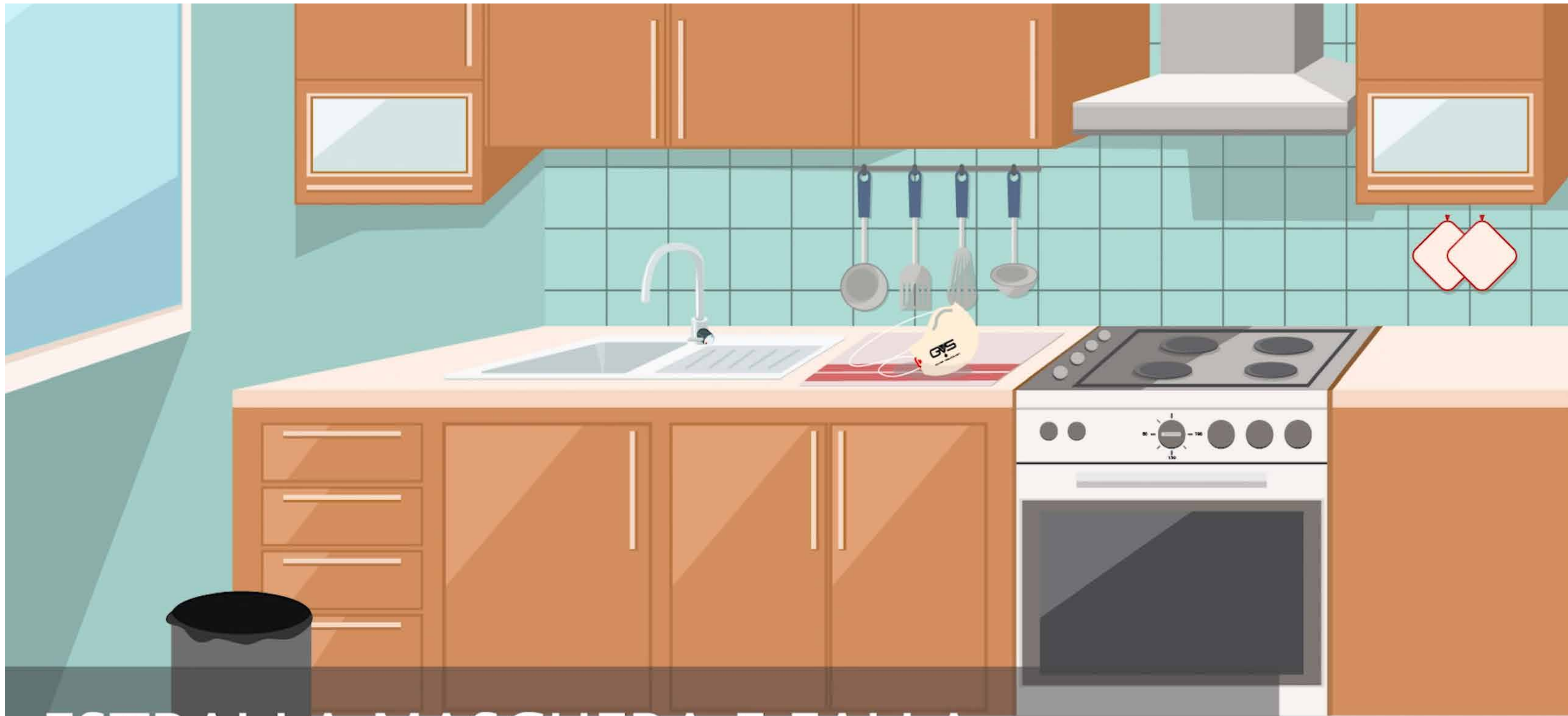

ESTRAI LA MASCHERA E FALLA
ASCIUGARE SU UNA SUPERFICIE PULITA

PUOI SANITIZZARE
ANCHE L'ELASTICO
DELLA MASCHERA
UTILIZZANDO DELLA
CARTA E UN
PRODOTTO
IGIENIZZANTE




CURIOSITÀ



PUOI VERIFICARE
LA TEMPERATURA
DEL FORNO INSERENDO
AL SUO INTERNO UN
CONTENITORE RIEMPITO
FINO A METÀ CON ACQUA
FREDDA E UN
ALBUME CRUDO



L'ALBUME DIVERRÀ
BIANCO QUANDO
IL FORNO AVRÀ
RAGGIUNTO I 65°C

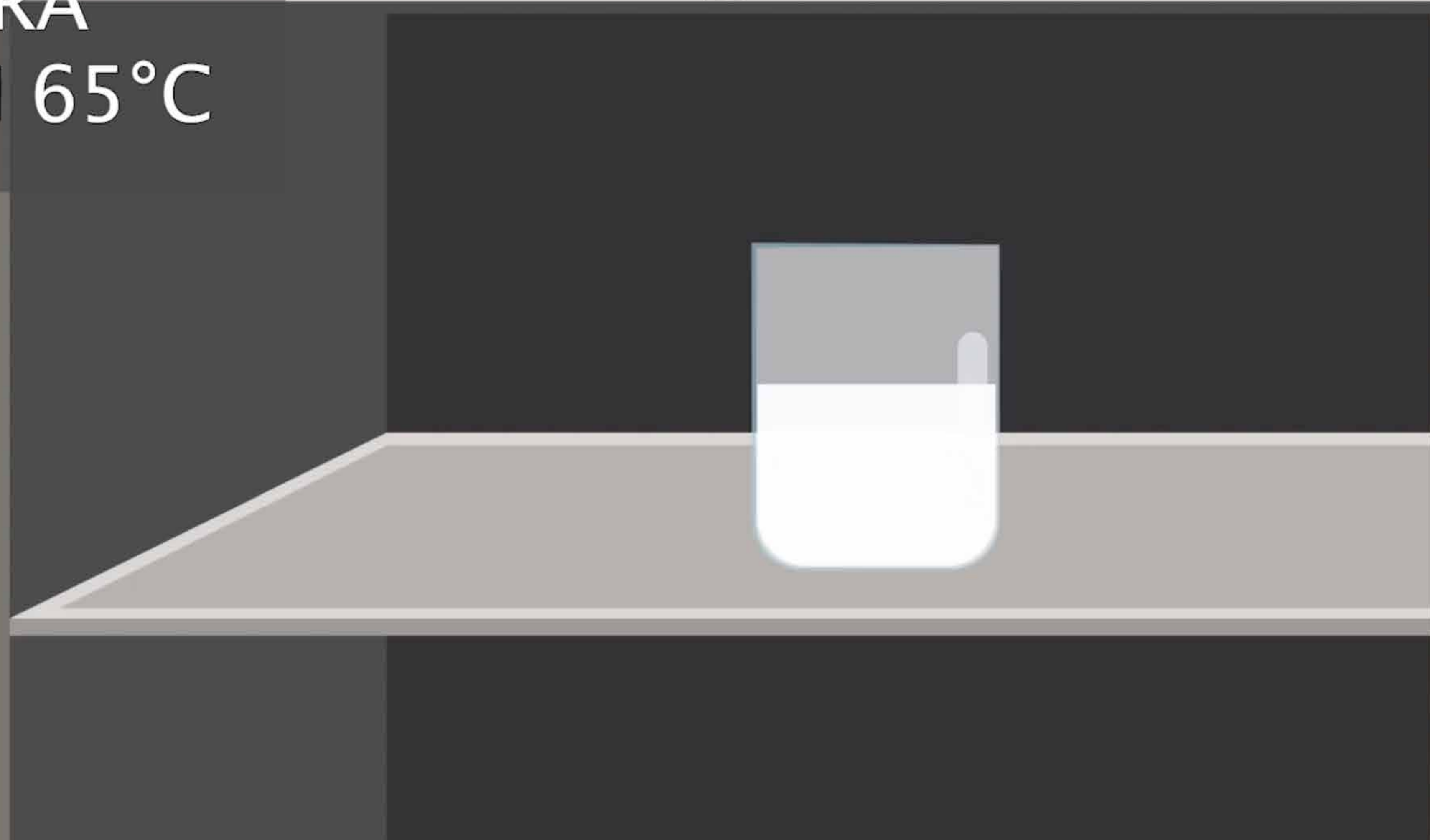

#covidtips
#stayhome



FILTER TECHNOLOGY